

Dětský korektor pro správné držení těla

Kód # 2005




Indikace: Korektor pomáhá k správnému držení těla, snižuje bolest v horní části páteře způsobenou skoliózou, kyfózou, kyfoscoliozou, artritidou, zabraňuje deformacím páteře, vytváří návyk držení rovné zadní strany páteře.

Funkce:

- upravuje špatné držení těla a zabraňuje únavě
- formovatelné vyjímatelné kovové výztuhy pomáhají rovnat páteř a zajistit správné držení těla
- široké popruhy stejnoměrně rozdělují tlak na ramena
- elastické popruhy pohodlně umístěné kolem těla




Kovové tvarovatelné výztuhy Elastická tkanina (prodyšná)

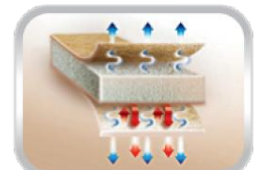

NORMAFLEX (trojvrstvá prodyšná teplozadržující tkanina)

Tabulka velikostí:

Rozměry	velikosti			Max. odchylka
	S	M	L	
Obvod hrudníku, cm	42-50	51-60	61-68	±1,0 cm

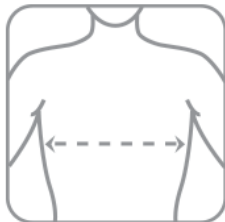

Měří se na úrovni lopatky

Barva:  béžová

Doporučení: Doporučuje se nošení přímo na těle. Upevněte pomocí suchého zipu na přední straně. Ujistěte se, že kovové výztuhy jsou umístěny symetricky podél páteře. Elastické pásy ved'te zezadu přes ramena dopředu, potom zpět podpažím, na zádech překřížit a upevnit pod hrudníkem pomocí suchého zipu. Doba použití: 2-4 hodiny na začátku, postupně zvyšovat na 10-12 hodin. Velikost volte podle obvodu hrudníku, tabulka výše. Individuální léčbu a podmínky určuje lékař.